

COLLECTEUR DE DECHETS MEDICAUX DISPO 1L – JAUNE/ROUGE



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N° YSCDY010

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Collecteur de déchets médicaux
Dénomination commerciale	Collecteur de déchets médicaux 1L
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Selon Annexe n°	N/A
Descriptif du dispositif	Collecteur à usage unique pour l'élimination d'objets piquants, coupants et tranchants. Modèle conçu pour les services à faible production de déchets (plateau de soins, chariots, cabinet médical, au domicile du patient...)

Caractéristiques

- Matériel : Polypropylène
- Fermeture : Couvercle avec hublot
- Couleur : Corps jaune, couvercle rouge
- Dimensions extérieures : 110x182 mm H (couvercle monté et fermé)
- Forme : Cylindrique
- Poids : 94gr
- Masse brute maximale : 500gr
- Capacité nominale : 1,000Lt
- EN ISO : 23907-1 :2019 – Kite Mark



Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
	Carton de 140 pièces	1 palette = 3360 pièces	1 palette par article

Principaux composants et matériaux	Polypropylène
Présence de latex	Non
Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non
Domaine et indication	Le collecteur de déchets est devenu une priorité incontournable dans le domaine de la santé. Chaque jour, les établissements de soins génèrent une quantité considérable de déchets qui nécessite une gestion appropriée pour éviter les risques sanitaires et préserver l'environnement.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stock	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Equipement à usage unique, protection et hygiène
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

MODE D'EMPLOI

Montage du couvercle

Lever le petit couvercle ovale du couvercle principal
Et positionner l'ouverture en correspondance du marquage



Appuyer fortement autour du couvercle avec la paume des mains.
Des clics se feront entendre à chaque pression et confirmeront la fermeture du Couvercle.



Fermeture provisoire

Le collecteur peut être fermé provisoirement
En abaissant le couvercle ovale jusqu'à bloquer la languette
Sur le bord de l'ouverture.



A ce stade, la réouverture est possible

Fermeture définitive

Du couvercle en position de fermeture provisoire, appuyer fortement
Avec 2 doigts sur le symbole « Push » central jusqu'au « clic »
Ensuite appuyer sur les 2 « push » latéraux jusqu'à entendre les « clics »
De fermeture définitive. La languette se trouvera en position verticale.



A ce stade, la fermeture est définitive

UTILISATION

- Pendant l'utilisation, ouvrir le couvercle en le bloquant avec le crochet prévu à cet effet. Et le refermer en fermeture provisoire entre chaque utilisation.
- Quand le niveau maximum de remplissage est atteint, fermer la boîte définitivement selon les instructions ci-dessus.
- Orifice pour l'introduction de déchets : Orifice de grande taille permettant l'introduction entre autres, des cloches à hémodcultures, épicroâniennes, bistouris, etc...
- Elimination : A la fin du cycle de vie, les boîtes sont éliminées sans émission de gaz nocifs ni dépôts de métaux lourds.

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.